

Notice d'utilisation – Poches urinaires non stériles SAUER

La dénomination commerciale et les caractéristiques du produit se trouvent sur l'étiquette. Les poches fonctionnelles peuvent être utilisées comme poche de jambe et/ou comme poche de lit : les poches de fauteuil roulant, les poches pour personnes valides, les poches sport, les poches discrètes et les poches rectangulaires sont prévues pour être utilisées comme poche de jambe. Produit destiné à un usage unique.

Utilisation prévue et indications

Les poches de recueil urinaire sont destinées à collecter l'urine des personnes dotées d'un dispositif d'évacuation d'urine.

Contre-indications

En raison d'un risque accru d'infection et/ou d'autres complications, les poches non stériles ne doivent pas être raccordées à un dispositif d'évacuation d'urine permanent invasif (p. ex. sonde permanente transurétrale, sonde suprapubienne, etc.).

Risques et mesures de précaution

Les poches urinaires ne doivent pas être posées sur la jambe en cas de troubles de la circulation périphériques, de syndrome du pied diabétique, d'ulcère de la jambe, etc. Toute utilisation non conforme à l'utilisation prévue est susceptible d'entraîner des complications. L'accumulation de l'urine, due par exemple au cou dage du dispositif d'évacuation de l'urine, peut entraîner un urosepsis/une dysrèflexie autonome potentiellement mortels. Si cela se produit, consultez immédiatement un médecin, ainsi que dans toute situation d'infection et d'accumulation d'urine persistante.

Mesures de précaution lors de l'utilisation

- Afin de garantir la bonne évacuation de l'urine, poser la poche de jambe/poche de lit en dessous du niveau de la vessie et éviter de couder ou de torsader le flexible d'entrée. Pour les poches de jambe, placer des sangles sous la poche.
- Afin de garantir une circulation sanguine suffisante, ne pas trop serrer les sangles de la poche de jambe et vérifier régulièrement que la peau située sous les sangles ne présente pas d'altérations, en insérant éventuellement une protection en matière souple sous les sangles.


Remarques concernant l'utilisation des poches de jambe

La poche de jambe peut être portée du côté droit ou du côté gauche. Il est recommandé de porter les poches de jambe à robinet pivotant blanc sur la jambe droite et les poches de jambe à robinet pivotant jaune sur la jambe gauche, afin d'éviter une ouverture accidentelle lorsque l'ailette du robinet repose sur le côté de la jambe. Raccourcir le flexible d'entrée de la poche de fauteuil roulant en fonction de la



taille de l'utilisateur en pratiquant une coupe en biais, afin de faciliter l'insertion du flexible de l'étui pénien. Humidifier si nécessaire. Pratiquer une coupe droite si le flexible d'entrée est relié à un adaptateur. Pour la pose de la sangle de jambe, veuillez observer la notice d'utilisation correspondante. Pour relier la poche de jambe à un étui pénien urinaire, enfoncer l'extrémité du flexible ou l'adaptateur de la poche dans l'embout du flexible de l'étui pénien. Vérifier que le raccordement est solide. Vérifier que le raccordement est solide.

Poches de fauteuil roulant :

Plusieurs œillets permettent une fixation individuelle sur le genou.

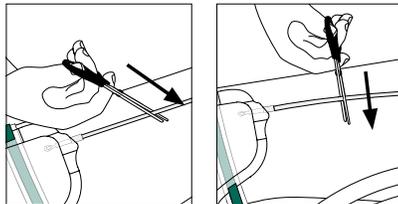


Raccourcir le flexible à la longueur souhaitée à l'aide de ciseaux (gauche : coupe en biais pour un flexible rigide, droite : coupe droite pour un flexible souple).

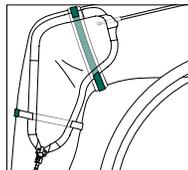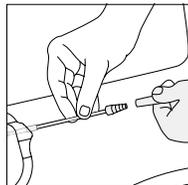

Poches sport/poches pour enfant, poches discrètes :



Fixation sur la cuisse (du côté extérieur ou intérieur) ou pose dans le pantalon sans fixation.

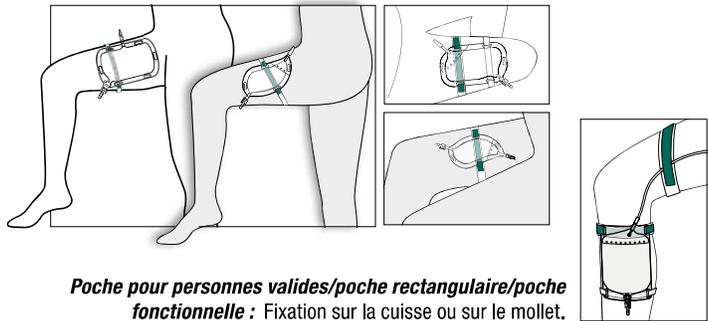

Poche pour personnes valides/poche rectangulaire/poche fonctionnelle : Fixation sur la cuisse ou sur le mollet.

Remarques concernant l'utilisation des poches de lit

Détendre le flexible après l'avoir retiré de l'emballage, afin de le lisser, conformément à l'illustration.

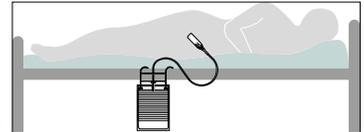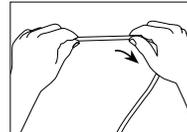

Suspendre ensuite la poche à l'aide d'une fixation sur le cadre du lit ou sur un support séparé. Retirer ensuite le capuchon de protection de l'adaptateur du flexible et enfoncer ce dernier sans le toucher dans l'entonnoir du dispositif d'évacuation d'urine permanent.

Raccordement poche de jambe et poche de nuit lit

Afin d'augmenter la capacité de recueil pendant la nuit, il est possible de raccorder une poche de lit sur la poche de jambe. Pour cela, enfoncer un flexible de raccordement sur le robinet de sortie de la poche de jambe et le relier à l'adaptateur de la poche de lit. Dans ce cas, la fermeture de la poche de jambe reste ouverte.

Vidange et remplacement

Pour vider la poche, ouvrir le robinet de sortie et laisser s'écouler l'urine dans les toilettes ou dans un récipient approprié. Refermer ensuite le robinet. S'il n'y a pas de robinet de vidange, couper le coin supérieur et vider l'urine dans les toilettes.

Pour remplacer une poche, détacher précautionneusement la fixation du dispositif d'évacuation d'urine permanent, sans toucher les extrémités ouvertes des raccords.

Élimination

Vider l'urine avant l'élimination. Jeter la poche urinaire avec les ordures ménagères.



Référence



Conserver au sec



Quantité



Tenir à l'abri de la lumière du soleil



Numéro de lot



Respecter la notice d'utilisation



Dispositif médical marqué CE



Date de péremption (année-mois-jour)



Ne pas réutiliser



Fabricant

Tout incident grave survenant lors de l'utilisation de poches de recueil urinaire « SAUER » devra être signalé au fabricant et aux autorités compétentes du pays dans lequel l'utilisateur est domicilié.

MANFRED SAUER GmbH n'assume aucune responsabilité en cas de dommages ou de blessures dus à la manipulation non conforme à la présente notice d'utilisation ou au non-respect des directives d'hygiène.



MANFRED SAUER GMBH

Neurott 7-15 • 74931 Lobbach • Germany
Tel. +49 6226 960 104 • Fax +49 6226 960 011
export@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com